



第一主界面 预览曲线参数

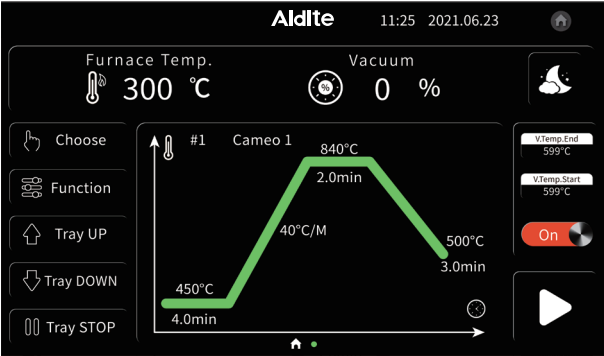

第二主界面 快速选择内置曲线

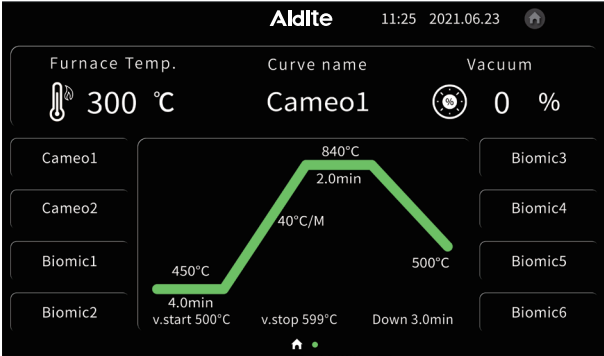

Aidite | 爱迪特
CFP-200 烤瓷炉

CFP-200烤瓷炉

| Ai智能控温·智能炉膛技术 | 112+8条内置程序 |

内置2条曲线匹配爱迪特玻璃陶瓷

	干燥时间min	开始温度℃	升温速率℃/min	最高温度℃	保温时间min	最终温度℃
Cameo1	4	450	40	840	2	500
Cameo2	4	450	40	840	6	500

*Cameo 1：科美玻璃陶瓷-贴面、嵌体曲线 Cameo 2：科美玻璃陶瓷-冠、桥曲线

内置6条曲线匹配Biomic糊剂

	干燥时间min	开始温度℃	升温速率℃/min	最高温℃	保温时间min	开炉温度℃	慢冷 (min)
Biomic 1	8	450	55	730	1	500℃	-
Biomic 2	8	450	55	720	1	500℃	-
Biomic 3	2	450	99	720	0.5	500℃	-
Biomic 4	8	450	40	730	1	400℃	5
Biomic 5	10	450	30	730	1	400℃	10
Biomic 6	1min	400℃	50℃/min	900℃	5min	400℃	-

*Biomic 1：第一次烧结 (2D糊剂、3D糊剂、透明釉) Biomic 2：第二次烧结 (2D 糊剂、3D糊剂、透明釉)
Biomic 3：(仅上透明釉) Biomic 4：氧化锆长桥
Biomic 5：(大于等于8个单位) Biomic 6：Biomic LiSi 无真空烧结曲线

Aidite | 爱迪特


爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
Aidite (Qinhuangdao) Technology Co.,Ltd.
Tel：0086-335-8587898
Fax：0086-335-8587198
Web：www.aidite.com
Email：info@aidite.com



爱迪特CFP-200烤瓷炉

AI智慧控制系统,实现控温精度±1℃,精准实现三级加热综合烧结过程,致密托盘结构与石英管包裹加热单元,防止加热单元老化,确保炉膛清洁,增强烧结过程的可靠性。

二阶烧结程序满足医生的特殊材料需求。

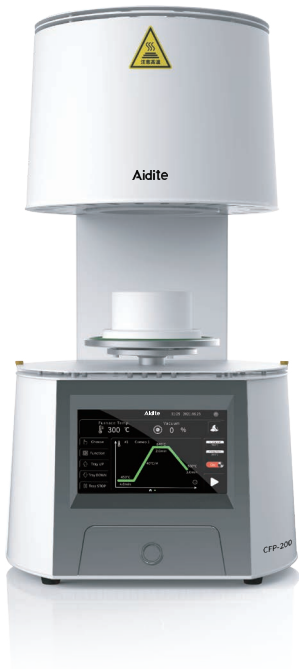

设备尺寸	362*316*596mm
设备重量	28KG
升温速率	1℃~100℃/min
炉膛尺寸	95mm*65mm
加热单元	螺旋石英管+镍铬电阻丝
型号	CFP-200
电压	220V/110V
最高温度	1100℃
真空度	Vmax= 95%
控温精度	±1℃
散热方式	主动散热
保修年限	1年
功率	1.5KW
炉体结构	托盘升降
控温系统	AI智能PID温控系统

*内置Biomic新糊剂烧结曲线、内置科美玻璃陶瓷应用曲线

CFP-200真空烧结程序

AI智能控制结合烤瓷炉与真空泵匹配程序,实现高纯度、稳定、均匀的真空环境,达成致密的烧成密度,提高烤瓷的抗断裂强度,降低临床崩瓷的机率。

独一无二的真空环境,剔透烧结效果,搭配的Biomic液态瓷粉可创造出令人惊叹的美学效果,让全锆修复体强度及美学双双兼具。



齿科应用

- 氧化锆上釉
- 玻璃陶瓷结晶
- 二阶烧结瓷粉上瓷
- 适配各种高低温瓷粉